

Dräger DrugTest® 5000

Анализатор наркотических веществ

Простой отбор, отсутствие контакта с образцом и малое время ожидания: никогда прежде тест на наркотические вещества не совершался так быстро и просто, как с Dräger DrugTest® 5000. Гарантия достоверности результата – автоматический анализ на месте сразу после отбора пробы.

- Готовый к немедленному использованию: чтобы привести пробоотборник в полную готовность – просто снимите колпачок и передайте пробоотборник человеку, которого хотите проверить.
- Анализ происходит без забора крови: безболезненно и гигиенично.
- Простое управление – с или без перчаток, подходит и для правой и для левой.
- Тест хранится в оригинальной упаковке без ухудшения качества.
- Наличие наркотических и психотропных веществ в слюнной жидкости может быть обнаружено сразу после сбора образца. Просто поместите пробоотборник и картридж в анализатор – оценка тут же будет произведена.
- Даже если вы нервничаете: управление происходит при помощи трех кнопок. Управление всеми операциями производится через меню. Просто следуйте простым текстовым инструкциям.
- Результат измерения отображается в виде полнотекстовых сообщений, благодаря чему невозможно двусмысленное толкование.
- Хранение и легкая обработка до 500 результатов с записью поверх старых данных.

Цветной дисплей с подсветкой
Чтение под любым углом.

Привычная ручка для переноски
Легко переносится в одной руке – даже без сумки.
Масса анализатора 4.5 кг.

Прочный корпус


Простое управление
тремя кнопками




Большое окно
Для удобного позиционирования
образца и картриджа
внутри анализатора.

Следующие виды наркотических и психотропных веществ могут быть обнаружены с помощью Dräger DRUGTEST® 5000

- Амфетамины
- Бензодиазепины
- Каннабиоиды
- Кокаин
- Метафетамин
- Опиаты
- Метадон

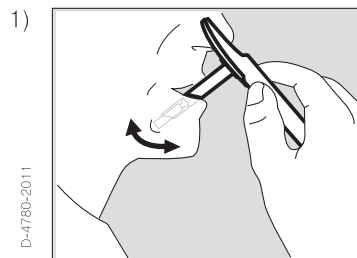

Тестируемый человек вводит верхнюю часть пробоотборника в ротовую полость и совершает жевательные движения одну — четыре минуты, затем возвращает вам тест – и вы не вступаете в контакт с образцом слюнной жидкости.

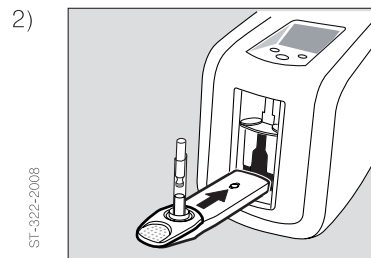

Когда в пробоотборнике достаточно слюны, индикатор становится синим, и вы можете сразу приступить к анализу с помощью Dräger DrugTest 5000, поместив туда пробоотборник и картридж.

D-54716-2012

D-4780-2011

SI-322-2008